



Penfine®
Classic

Einfach zuverlässig.



swissmade 

mylife™ Penfine® Classic – der Dreh, auf den Sie sich verlassen können.

- Nur zwei Drehbewegungen für einen sicheren Sitz
- Dünnwandtechnologie für besseren Medikamentendurchfluss
- Spezielle Silikon-Oberflächenbehandlung für maximalen Injektionskomfort
- Farbcodierung zur einfachen Unterscheidung der Nadellängen
- Mit allen gängigen Injektionspens kompatibel¹ und in den Längen 4, 6 und 8 mm erhältlich




Mehr Freiheit. Mehr Lebensfreude. Mit mylife™.

YPSOMED
SELF CARE SOLUTIONS




Einfach von Anfang an


Passt auf alle gängigen Injektionspens¹

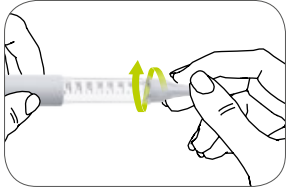

Schrauben Sie die Nadel auf den Pen, bis sie einrastet.

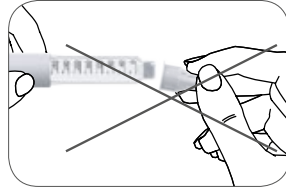

Achten Sie darauf, dass Sie die Nadel beim Aufschrauben auf den Pen nicht schräg halten.

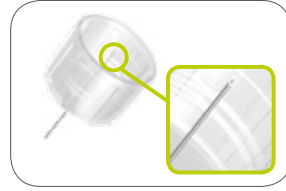

Das Doppelgewinde erlaubt eine schnelle und einfache Fixierung.



Durch Universal Twist passen die Nadeln auf alle gängigen Injektionspens.¹



Premium-Qualität


Für verlässlichen Komfort



Medizinische Kanüle höchster Qualität: **Die 4 mm und 6 mm langen Nadeln besitzen eine superfeine 32G-Kanüle.** Dreifacher Präzisions-Facettenschliff und hochwertig geschliffene Nadelspitze.



Spezielle Silikon-Oberflächenbehandlung mit adhäsivem Silikon, das auf der Kanüle verbleibt.

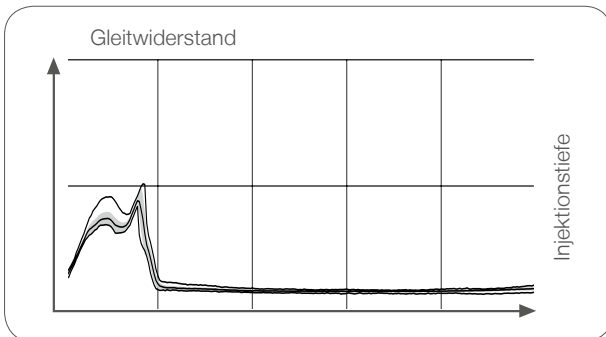

Messbare Qualität und gleichmäßige Injektion: Die Einstich- und Gleitkräfte von mylife™ Penfine® Classic zeichnen sich durch perfekte Eigenschaften aus.²



Gut greifbare äußere Schutzkappe. Freie Abreiðblasche für ein schnelles und einfaches Entfernen der Abziehfolie.



Universal Twist

mylife™ Penfine® Classic passt auf alle gängigen Injektionspens¹

Nach ISO 11608-2:2012 sind die mylife™ Penfine® Classic Pen-Nadeln bei Anwendung mit den auf der Packung angegebenen Injektionspens voll funktionsfähig und bieten mehr Sicherheit.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Injektionspens. Bei der Verwendung der mylife™ Penfine® Classic Pen-Nadeln beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung Ihres Injektionspens.



Nur zwei Drehbewegungen für einen sicheren Sitz

Die intuitive Methode zur Befestigung der Nadel

- Die Stopffunktion sorgt für einen perfekten Sitz
- Schnelle und sichere Befestigung
- Einfach und praktisch in der Anwendung
- Für medizinische Anwendungen zugelassenes, modernstes Kunststoffmaterial



**UNIVERSAL
TWIST**



Wählen Sie die richtige Nadellänge für Ihre Patienten

Farbcodierung zur einfachen Unterscheidung der Nadellängen

Die mylife™ Penfine® Classic Pen-Nadel gibt es in drei verschiedenen Längen: 4, 6 und 8 mm.

Die kürzere Pen-Nadel ist optimal für Kinder und schlanke Erwachsene geeignet. Damit reduzieren Sie das Risiko von Injektionen in den Muskel.^{3,4}



4 mm
32 G / 0.23 mm
PZN 08527072



6 mm
32 G / 0.23 mm
PZN 08527190



8 mm
31 G / 0.25 mm
PZN 08527333

¹ Siehe Packung.

² Interne Daten von Ypsomed.

³ Gibney et al: Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injections: Implications for needle length recommendations – Current Medical Research & Opinion Vol. 26, No. 6, 1519 – 1530, 2010.

⁴ Hirsch L. et al, Curr Med Res Opin 26 (6) 1519-1530, 2010.

Mehr **Freiheit.**
Mehr **Lebensfreude.**
Mit **mylife™**.



Blutzucker-
messsysteme



Pen- und Sicherheits-
Pen-Nadeln



Infusionssysteme



Zubehör und
Dienstleistungen

mylife™ ist ein Produkt- und Dienstleistungsprogramm für Menschen mit Diabetes. Es bietet ihnen alles, was sie für eine zuverlässige, einfache Selbstbehandlung brauchen und ermöglicht ihnen mehr Freiheit und mehr Freude am Leben, das sie führen wollen.

Deutschland

Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach //
info@ypsomed.de // www.mylife-diabetescare.de // kostenlose Service-Hotline: 0800 9776633