

Das Porto
übernehmen
wir für Sie

Deutsche Post
ANTWORT

Ypsomed GmbH
Marketing-Service
Postfach 20 03 07
60604 Frankfurt/M.

my life Pura X



my life Pura X



Machen Sie Ihr mylife™ Pura® X bunt!



Bestellen Sie kostenlos eine Silikonschutzhülle in Ihrer Lieblingsfarbe unter 0800 9776633

my life Diabetescare

Mehr **Freiheit.**
Mehr **Lebensfreude.**
Mit **mylife™.**



Blutzucker-
messsysteme



Infusionssysteme



Pen- und Sicherheits-
Pen-Nadeln



Zubehör und
Dienstleistungen

mylife™ ist ein Produkt- und Dienstleistungsprogramm für Menschen mit Diabetes. Es bietet ihnen alles, was sie für eine zuverlässige, einfache Selbstbehandlung brauchen und ermöglicht ihnen mehr Freiheit und mehr Freude am Leben, das sie führen wollen.

Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach //
info@ypsomed.de // www.mylife-diabetescare.de //
kostenlose Service-Hotline: 0800 9776633

700000029/1004-1067-DE-de-V01

my life Pura X

**Einfach
präzise.**



mylife™ Pura® X – einfach in der Anwendung dank seitlich einführbarem Teststreifen und großem Display.

- Voreingestelltes Blutzuckermesssystem für schnelle Initialisierung und einfache Einweisung
- Grundfunktionen für einfache und intuitive Bedienung
- Seitlich einführbarer Teststreifen zur hygienischen Entfernung des Teststreifens ohne Blutkontakt
- Stabile Teststreifen mit gutem Griff für eine einfache Handhabung



YPSOMED
SELFCARE SOLUTIONS



Mehr Freiheit. Mehr Lebensfreude. Mit mylife™.

YPSOMED
SELFCARE SOLUTIONS

mylife™ Pura® X
Einfach, zuverlässig und sanft



Einfach

Die einfache und sichere Anwendung macht mylife™ Pura® X zum idealen Blutzuckermessgerät. Keine Voreinstellung erforderlich.

Zuverlässig^{1,2}

Die High Definition Signal Transmission (HDST) Technologie erzielt sehr genaue Messergebnisse dank kürzester Signalwege, Goldkontakten und Autocoding.

Sanft


Das mylife™ Softlance Lanzettengerät bietet dank vibrationsfreiem Stechen besonderen Komfort bei der Blutentnahme. Präzise Führungsschienen sorgen für eine linear geführte Vorwärts- und Rückwärtsbewegung der Lanzette und damit für weniger Schmerz beim Einstich.

¹ Bionime Corporation: Test Report for the System Accuracy Evaluation of Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550 (mylife™ Pura® X), Min-Sheng General Hospital, Taiwan, 05.2015.

² Bionime Corporation: Test Report for the Evaluation of Precision (ISO 15197:2013), Model GM550 (mylife™ Pura® X) and Strip GS550 (mylife™ Pura®), Taichung, Taiwan, 04.2015.

Haftungsausschluss: Die hier erwähnten Marken von Drittanbietern sind Marken der jeweiligen Eigentümer.


mylife™ Pura® X Blutzuckermessgerät
Einfache Handhabung dank großer, stabiler Teststreifen

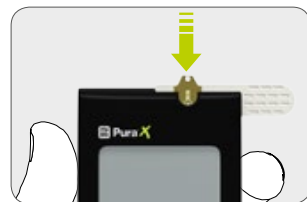

Autostart

Durch Einlegen des Teststreifens wird das Gerät aktiviert.

Wenn der große und stabile Teststreifen korrekt eingeführt wurde, wird ein Signalton abgegeben. Beim Auftragen des Blutes zeigt der Teststreifen an, wenn genügend Blut aufgebracht wurde.

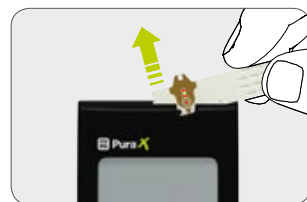


Einfache Streifenentfernung

Einfach und sauber ohne Blutkontakt.



Extra großes beleuchtetes Display

Die Messergebnisse sind dank großer Zahlen und einem beleuchteten Display zu jeder Tages- und Nachtzeit leicht ablesbar.

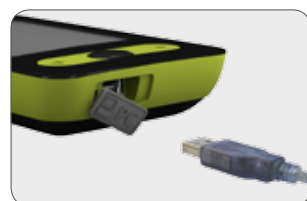

Extra großer Datenspeicher


Automatische Speicherung der letzten 500 Messwerte mit Durchschnittsberechnung (1, 7, 14, 30, 90 Tage). Mini-USB-Port zur Datenübertragung auf den Computer (Spezialkabel erforderlich). Daten können in die mylife™ Software, Diabass®, SiDiary und diasend® übertragen werden.

mylife™ Pura® X Lanzettengerät
Sanfte und schonende Blutentnahme




Variable Einstichtiefen

Sieben Einstichtiefen für eine individuelle Einstellung und effektives Stechen.

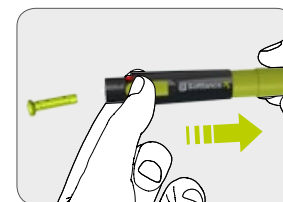


Hygienischer Lanzettenauswurf

Die mylife™ Softlance zeichnet sich durch eine Sicherheitsfunktion und einen einfachen Lanzettenwechsel aus.

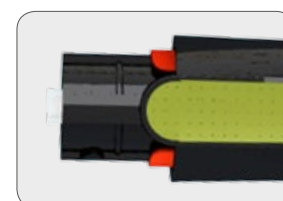

Spezieller Verletzungsschutz

Zur Vermeidung von Stichverletzungen durch versehentliches Auslösen beim Lanzettenwechsel.

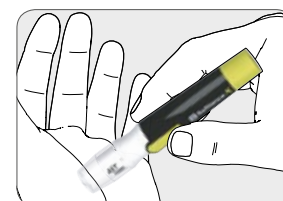

Alternative Teststellen

Der beiliegende weiße AST-Aufsatz ermöglicht Blutprobenentnahmen an alternativen Teststellen.



Ja, ich möchte das kostenlose Starterpaket!
Starterpaket:

- 1 mylife™ Pura® X
- 1 mylife™ Softlance X Lanzettengerät
- 10 mylife™ Lanzetten
- 10 mylife™ Pura® Teststreifen
- 1 mylife™ Pura® X Softcase

Ich benötige das Gerät in der Einheit

- mylife™ Pura® X mg/dL
 mylife™ Pura® X mmol/L



Frau Herr

Titel/Name/Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Ich willige ein, dass die Ypsomed GmbH (Höchster Straße 70, 65835 Liederbach) meine Kontaktdaten zu Werbezwecken (Informationen im Zusammenhang mit Diabetes und Produkten zur Diabetesbehandlung) erhebt, verarbeitet und nutzt.

Ort, Datum

Unterschrift

Zudem willige ich ein, dass mir die Ypsomed GmbH Informationen im Zusammenhang mit Diabetes und Produkten zur Diabetesbehandlung zusendet, auch mittels:

E-Mail: _____

Telefon: _____

Ort, Datum

Unterschrift

Ich kann jederzeit ohne Angaben von Gründen gegenüber der Ypsomed GmbH (Höchster Str. 70, 65835 Liederbach; info@ypsomed.de) der weiteren Verwendung meiner Daten für die vorgenannten Zwecke widersprechen.