



mylife™ SafetyLancets

Geringeres Risiko versehentlicher Nadelstichverletzungen bei der Entnahme von Kapillarblutproben

Das innovative patentierte Design der mylife™ SafetyLancets macht die Entnahme kapillarer Blutproben einfach und sicher. Die Einmal-Auslösefunktion und eine versiegelte Schutzkappe bieten Sicherheit und schützen Patienten wie auch medizinisches Fachpersonal vor Kreuzkontamination und Verletzungen. mylife™ SafetyLancets sind in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: mylife™ SafetyLancets (28G/1.5 mm) und mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1.2 mm).

Sicherheitsmerkmale beider Produkte

- An der Sicherheitsversiegelung lässt sich erkennen, ob die mylife™ SafetyLancet noch unbenutzt ist
- Die Schutzkappe bewahrt die Sterilität und verhindert eine Kontaminierung vor dem Gebrauch
- Dank einmaliger Auslösefunktion nach Gebrauch nicht wiederverwendbar



mylife™ SafetyLancets (28G/1.5 mm)


Komfortmerkmale beider Produkte

- Hohe Nadelqualität (dreifach angeschrägte Nadelspitze) unterstützt einen guten Blutfluss bei hohem Komfort
- Kein Laden oder Zusammensetzen vor dem Gebrauch erforderlich




mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1.2 mm)


So verwenden Sie die mylife™ SafetyLancet

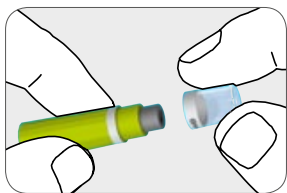


1 Einfach die Schutzkappe drehen und von der mylife™ SafetyLancet abziehen.

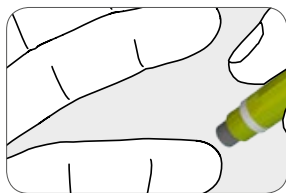

2 Die mylife™ SafetyLancet auf die Fingerkuppe aufsetzen.

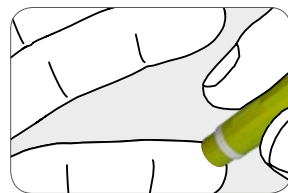

3 Die erhöhte Plattform fest gegen die gewählte Stelle drücken, um den Lanzettenmechanismus zu aktivieren.

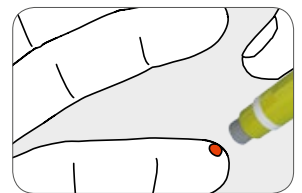

4 Die Nadel springt sofort nach Gebrauch wieder zurück. Dank der einmaligen Auslösefunktion kann die mylife™ SafetyLancet nicht versehentlich wiederverwendet werden.





mylife™ SafetyLancets

Sterile Einmal-Sicherheitslanzetten zur sicheren und komfortablen Routineentnahme von medizinischen Blutproben

In Packungen zu je 200 Stück mit praktischem Schiebedeckel erhältlich



mylife™ SafetyLancets (28G/1.5 mm)



mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1.2 mm)

Zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels und für andere diagnostische Tests in

- Diabetes-Fachzentren
- Krankenhäusern
- der häuslichen Pflege
- Pflegeheimen
- Praxen

Sterilität bleibt 5 Jahre lang erhalten

- Sterilisationsdosis nach ISO 11137 festgelegt
- Gammasterilisiert (Cobalt-60-Bestrahlung)

Best.-Nr.	Menge	Beschreibung	Gauge	Nadeldurchmesser	Einstichtiefe
7100031	200 St.	mylife™ SafetyLancets	28G	0.36 mm	1.5 ± 0.2 mm
700001495	200 St.	mylife™ SafetyLancets Comfort	30G	0.32 mm	1.2 ± 0.2 mm

Beschreibung	PZN-Nr. Deutschland	PZN-Nr. Österreich
mylife™ SafetyLancets	9123827	3943618
mylife™ SafetyLancets Comfort	11286117	4355473

Deutschland

Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach //
 info@ypsomed.de // www.mylife-diabetescare.de // kostenlose Service-Hotline: 0800 9776633

Österreich

Ypsomed GmbH // Am Euro Platz 2 // 1120 Wien //
 info@ypsomed.at // www.mylife-diabetescare.at // Service-Hotline: 0720 882 304
 (Es gelten die Tarife für Österreich)

Schweiz

Ypsomed AG // Markt Schweiz // Brunnmattstrasse 6 // 3401 Burgdorf //
 info@ypsomed.ch // www.mylife-diabetescare.ch //
 kostenlose Service-Hotline: 0800 44 11 44