



## mylife™ SafetyLancets

Geringeres Risiko versehentlicher Nadelstichverletzungen bei der Entnahme von Kapillarblutproben

Das innovative patentierte Design der mylife™ SafetyLancets macht die Entnahme kapillarer Blutproben einfach und sicher. Die Einmal-Auslösefunktion und eine versiegelte Schutzkappe bieten Sicherheit und schützen Patienten wie auch medizinisches Fachpersonal vor Kreuzkontamination und Verletzungen. mylife™ SafetyLancets sind in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm) und mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm).

### Sicherheitsmerkmale beider Produkte

- An der Sicherheitsversiegelung lässt sich erkennen, ob die mylife™ SafetyLancet noch unbenutzt ist
- Die Schutzkappe bewahrt die Sterilität und verhindert eine Kontaminierung vor dem Gebrauch
- Dank einmaliger Auslösefunktion nach Gebrauch nicht wiederverwendbar



mylife™ SafetyLancets  
(28G/1,5 mm)


### Komfortmerkmale beider Produkte

- Hohe Nadelqualität (dreifach angeschrägte Nadelspitze) unterstützt einen guten Blutfluss bei hohem Komfort
- Kein Laden oder Zusammensetzen vor dem Gebrauch erforderlich




mylife™ SafetyLancets Comfort  
(30G/1,2 mm)


### So verwenden Sie die mylife™ SafetyLancet

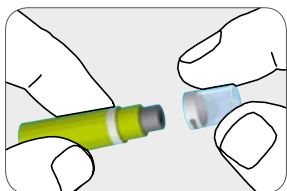


**1** Einfach die Schutzkappe drehen und von der mylife™ SafetyLancet abziehen.

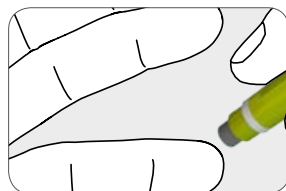

**2** Die mylife™ SafetyLancet auf die Fingerkuppe aufsetzen.

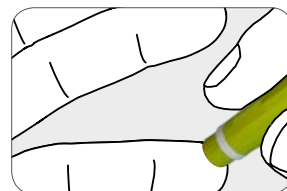

**3** Die erhöhte Plattform fest gegen die gewählte Stelle drücken, um den Lanzettenmechanismus zu aktivieren.

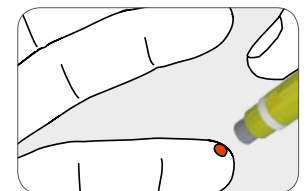

**4** Die Nadel springt sofort nach Gebrauch wieder zurück. Dank der einmaligen Auslösefunktion kann die mylife™ SafetyLancet nicht versehentlich wiederverwendet werden.





## mylife™ SafetyLancets

Sterile Einmal-Sicherheitslanzetten zur sicheren und komfortablen Routineentnahme von medizinischen Blutproben

In Packungen zu je 100 und 200 Stück mit praktischem Schiebedeckel erhältlich



mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm)



mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm)

### Zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels und für andere diagnostische Tests in

- Diabetes-Fachzentren
- Krankenhäusern
- der häuslichen Pflege
- Pflegeheimen
- Praxen

### Sterilität bleibt 3 Jahre lang erhalten

- Sterilisierungsdosis nach ISO 11137 festgelegt
- Gammasterilisiert (Cobalt-60-Bestrahlung)

Gauge	Nadel-durchmesser	Einstichtiefe	Beschreibung	Menge	Best.-Nr.	PZN-Nr. DE	PZN-Nr. AT
28G	0,36 mm	1,5 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets	100 St.	<b>700009359</b>	12900424	4615773
28G	0,36 mm	1,5 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets	200 St.	<b>7100031</b>	9123827	3943618
30G	0,30 mm	1,2 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets Comfort	100 St.	<b>700009361</b>	12900430	4615796
30G	0,30 mm	1,2 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets Comfort	200 St.	<b>700001495</b>	11286117	4355473

#### Deutschland

Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach //  
 info@ypsomed.de // www.mylife-diabetescare.de // kostenlose Service-Hotline: 0800 9776633

#### Österreich

Ypsomed GmbH // Am Euro Platz 2 // 1120 Wien //  
 service@ypsomed.at // www.mylife-diabetescare.at // kostenlose Service-Hotline: 00800 55 00 00 00

#### Schweiz

Ypsomed AG // Markt Schweiz // Brunnmattstrasse 6 // 3401 Burgdorf //  
 info@ypsomed.ch // www.mylife-diabetescare.ch //  
 kostenlose Service-Hotline: 0800 44 11 44