

i mylife™ SafetyLancets

Entnahme kapillarer Blutproben mit minimiertem Risiko versehentlicher Stichverletzungen

Das innovative patentierte Design macht die Entnahme kapillarer Blutproben einfach und sicher. Die Einmal-Auslösefunktion und eine versiegelte Schutzkappe garantieren höchste Sicherheit und schützen das Pflegepersonal wie auch Patienten vor Stichverletzungen.




Sicherheitsfunktionen

- Die Sicherheitsversiegelung garantiert, dass die mylife™ SafetyLancets noch unbenutzt ist
- Die Schutzkappe bewahrt die Sterilität und verhindert eine Kontaminierung vor dem Gebrauch
- Die vor und nach Gebrauch sicher verborgene Nadel minimiert versehentliche Stichverletzungen
- Durch die Einmal-Auslösefunktion kann die Lanzette kein zweites Mal verwendet werden


Komfortfunktionen

- Der Einstich mit hoher Geschwindigkeit minimiert den Schmerz
- Höchste Nadelqualität (dreifach angeschrägte Nadelspitze) garantiert optimalen Blutfluss bei maximalem Komfort
- Kein Laden oder Zusammensetzen vor Gebrauch erforderlich


So verwenden Sie die mylife™ SafetyLancets

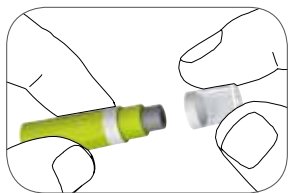


1 Drehen Sie einfach die Schutzkappe und ziehen Sie diese von der mylife™ SafetyLancets ab.

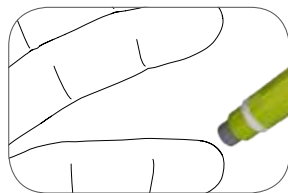

2 Setzen Sie die mylife™ SafetyLancets auf den Finger auf.

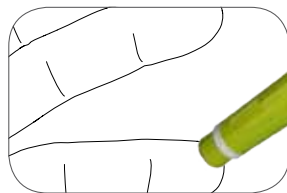

3 Drücken Sie die erhöhte Plattform fest gegen die gewählte Stelle, um den Lanzettenmechanismus auszulösen.

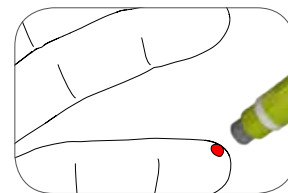

4 Die Nadel zieht sich sofort nach Gebrauch wieder zurück. Dank der Einmal-Auslösefunktion kann die mylife™ SafetyLancets nicht versehentlich ein zweites Mal benutzt werden.



5 Entsorgen Sie die mylife™ SafetyLancets gemäss den vor Ort geltenden Vorschriften.



mylife™ SafetyLancets

Sterile Einmal-Sicherheitslanzetten zur sicheren und komfortablen Entnahme von medizinischen Blutproben

Erhältlich in Packungen zu je 200 Stk. mit praktischem Schiebedeckel



Zur Überwachung des Blutzuckerspiegels und für andere diagnostische Tests in

- Diabetes-Fachzentren
 - Spitälern
 - Privater Heimpflege
- etc.

Sterilität bleibt 3 Jahre lang erhalten

Sterilisierungsdosis nach ISO 11137 festgelegt

Sterilisiert durch Co-60-Bestrahlung

Best.-Nr.	Menge	Beschreibung	Gauge	Nadeldurchmesser	Nadellänge	Aussendurchmesser
7100031	200 Stk.	mylife™ SafetyLancets	28G	0.36 mm	3.0 +/- 0.3 mm	10.5 +/- 2.0 mm

Kostenlose Service-Hotline: 0800 44 11 44

Für mehr Informationen besuchen Sie www.mylife-diabetescare.ch

Ypsomed AG // Markt Schweiz // Brunnmattstrasse 6 // 3401 Burgdorf

www.ypsomed.com // T +41 34 424 41 41 // F +41 34 424 33 20 // swissmarket@ypsomed.com